


Comment connecter une aide auditive à un iPhone.

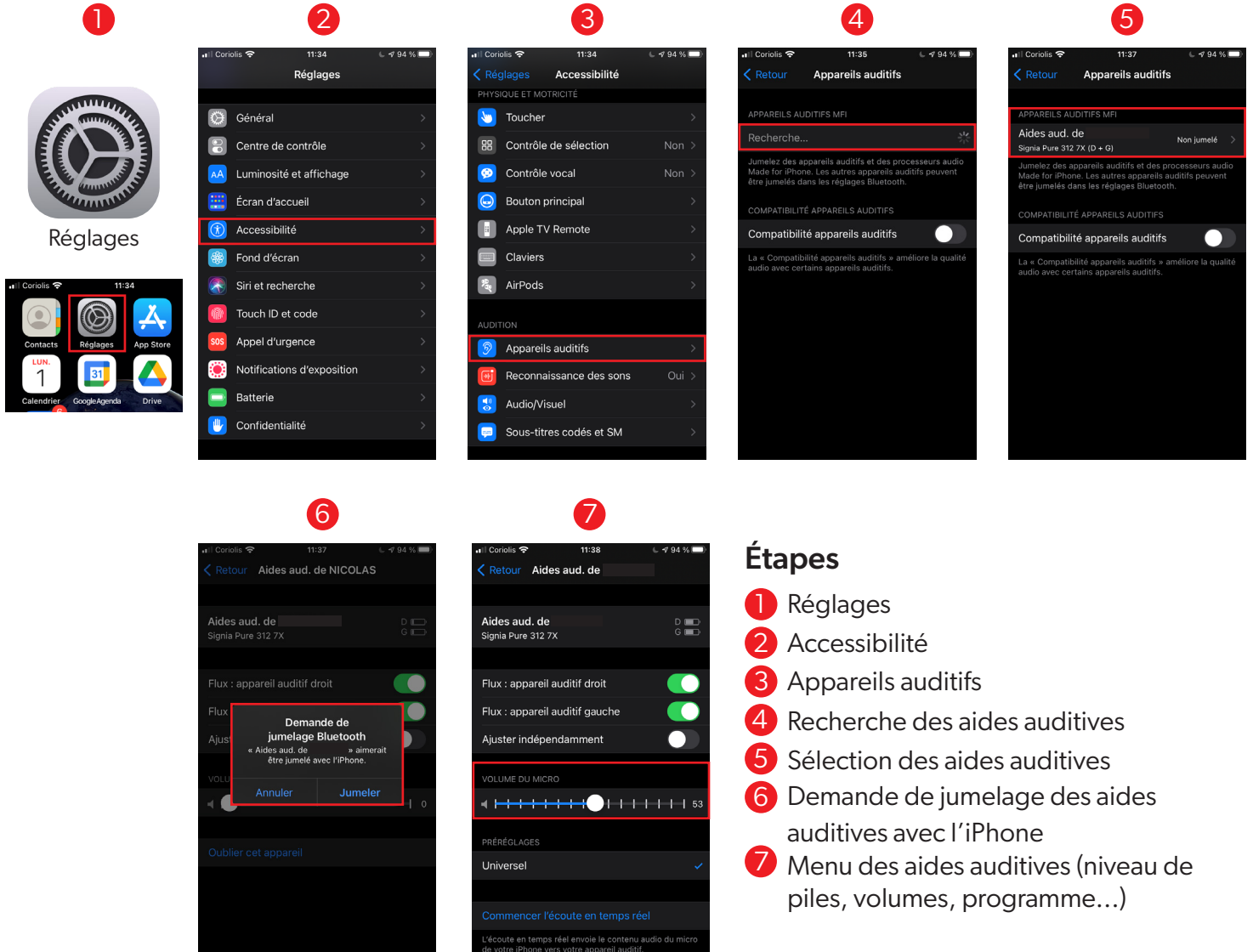

- 1 Réglages
- 2 Accessibilité
- 3 Appareils auditifs
- 4 Recherche des aides auditives
- 5 Sélection des aides auditives
- 6 Demande de jumelage des aides auditives avec l'iPhone
- 7 Menu des aides auditives (niveau de piles, volumes, programme...)

Étapes

- 1 Réglages
- 2 Accessibilité
- 3 Appareils auditifs
- 4 Recherche des aides auditives
- 5 Sélection des aides auditives
- 6 Demande de jumelage des aides auditives avec l'iPhone
- 7 Menu des aides auditives (niveau de piles, volumes, programme...)

Astuces

1. Vérifier que les appareils sont bien déconnectés de Connexx.
2. Bien activer le **Bluetooth**® sur l'iPhone.
3. Entre les étapes 4 et 5, redémarrer les appareils auditifs (mode appairage actif 3 minutes).
4. Approcher les aides auditives de l'iPhone.
5. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, redémarrez votre iPhone.
6. Si 1 appareil sur 2 est connecté, *oubliez-le* dans l'iPhone et recommencez la configuration.